

CPAP & CPAP Suministros – Guía de limpieza/reemplazo

Limpieza de CPAP Accesorios



Marco de máscara y almohadón

Limpiar con solución de jabón antibacterial y agua
o vinagre y agua



Cámara de humidificación

Lavar con solución de jabón antibacterial y agua
o vinagre y agua



Tubo calentado o tubo estándar

Lavar con solución de jabón antibacterial y agua
o con vinagre y agua

Una vez por semana

*Después de lavar, deje los artículos secar al aire.
*No seque los artículos usando toalla.
*Para hacer la solución:
4 partes agua y
1 parte jabón antibacterial
o vinagre

Frecuencia de Reemplazo para Mascarilla Facial



Mascarilla Facial



Cambio de almohadón

Una vez por mes



Cambio de Filtros

Cada dos semanas

Frecuencia de Reemplazo para Mascarilla Nasal y Almohadillas Nasal



Almohadón Facial/ Almohadilla Nasal



Cambio de almohadón nasal



Cambio de almohadilla nasal



Cambio de Filtros

Cada dos semanas